




SERVICENUMMER  
0800 589 21 48

# Zukunft

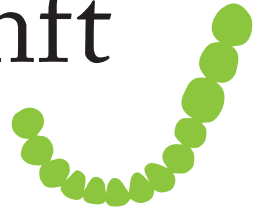

## Clear Relief™

Die Zukunft von Aufbissschienen



Weiche Okklusionsschienen führen Berichten zufolge zu einer Verstärkung von Bruxismus, da das nachgiebige Material die nächtliche Muskelaktivität stimulieren kann. Harte Okklusionsschienen zeigen im Vergleich zu weichen eine statistisch signifikante Reduzierung der Muskelaktivität (1). Manche Patienten empfinden jedoch schon geringe Passungenauigkeiten als unangenehm.

Clear Relief™ löst dieses Problem durch eine harte Okklusalfäche und die Möglichkeit, dass die Patienten selbst kleine Anpassungen daran vornehmen können.

Ob zur Behandlung einer Dysfunktion des Temporomandibulargelenks oder bei Bruxismus: Clear Relief™-Okklusionsschienen können individuell an das von Ihnen gewünschte Design angepasst werden. Im Folgenden sind einige der wesentlichen Vorteile von Clear Relief™ aufgeführt.


Quelle: (1) Okeson J.P. (1987). The effects of hard and soft occlusal splints on nocturnal bruxism – Journal of American Dental Association. Juni: 114(6)788-91.





**SERVICENUMMER**  
0800 589 21 48

# Zukunft

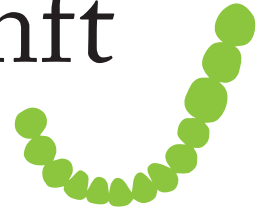

## Clear Relief™

Die Zukunft von Aufbisschienen



### Exakte individuelle Passform

Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung von Clear Relief™ können die Patienten geringfügige Abweichungen bei Passform und Biss selbst korrigieren. Dazu muss die Clear Relief™-Schiene nur 1 Minute lang in heißes Wasser gelegt werden und der Patient anschließend mit leichtem Druck zubeißen. Auf diese Weise wird die Schiene an den Biss angepasst und erhärtet beim Abkühlen wieder. Dadurch wird nicht nur der Komfort für die Patienten erhöht, sondern auch die Behandlungsdauer verkürzt.

### Vermeidung allergischer Reaktionen

Clear Relief™ ist MMA-frei. Daher ist die Gefahr einer allergischen Reaktion extrem gering. Gleichzeitig wirkt das MMA-freie Material gegen starke Gerüche, die bei herkömmlichem Beißschienenmaterial entstehen können.

### Reparatur und Unterfütterung möglich

Hart- und Weichgewebe verändert sich im Laufe der Zeit, was sich auf die Passform der Schiene auswirken kann. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann Clear Relief™ unterfüttert oder bei Schäden repariert werden.

### Festigkeit

Die Stabilität von Clear Relief™ ist höher als die anderer Aufbisschienen, und die Bruchfestigkeit ist hoch. Dadurch werden Verformungen langfristig minimal gehalten. Kleine Lösungen halten großem Druck stand.

### Design

Das Design Ihrer Clear Relief™-Okklusionsschiene kann von unserem erfahrenen Techniker angepasst werden. Ob Michigan, NTI-tss, flach oder auch mit Klammern: Clear Relief™ wird Ihren individuellen Anforderungen gerecht.

